


Patch




test

TECNICA DI ESECUZIONE

1 Contrassegnare il dorso del cerotto contenuto nella confezione LEUKO-TEST con numeri o sigle di identificazione. Porre quindi una sufficiente quantità/o una goccia di sostanza (dispensata dalla siringa o dal flacone presente nel kit) sul tamponcino di puro cotone situato nel cerotto.

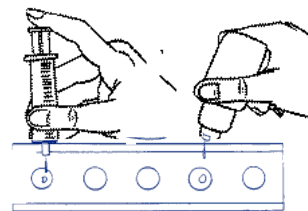

2 Applicare il cerotto, una volta completata la deposizione degli allergeni da testare, nelle zone paravertebrali dorsali dopo aver deterso in maniera opportuna la cute (alcol, acqua, ecc.)

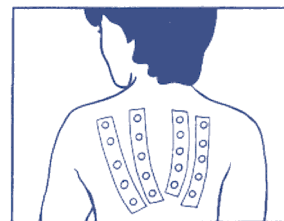

TECNICA DIAGNOSTICA

LETTURA RISULTATI: da effettuarsi dopo **48 h** previa asportazione del cerotto

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI:

+	=	eritema
++	=	eritema, edema
+++	=	eritema, edema e vescicolazione
++++	=	eritema, edema e bolla

A distanza di tempo possono persistere eventuali pigmentazioni della cute.

N.B. I KITS necessitano di stoccaggio a temperatura di frigorifero (2° - 8° C) al momento del ricevimento. Il trasporto non refrigerato non danneggia il prodotto sempre che vengano osservate, in questa fase, le elementari norme di conservazione riguardanti prodotti di questo tipo.